



WELL-2

Reliable endoscope washer & disinfecter



Quick 소독 기능

Quick 소독으로 보다 간편하고 빠르게 내시경 소독이 가능합니다.



대용량 챔버로 한번에 2개 내시경 소독

2개의 내시경 동시 세척 가능한 모델로, 세척시간을 절약합니다.



소독력 확보를 위한 안전장치

역류 체크 밸브로 소독제의 역류 및 희석을 방지하고, 소독제 필터 사용으로 내시경 채널에 이물질의 유입을 차단합니다.

WELL-2 제품정보

내시경수량	세척방법	화면표시방법	디지털/방수체크기능	소독제필터
2개	360° 회전분사	FnD	✓	✓
소독제사용 횟수기록	알코올기능	세정제기능	에어건	물통장착
✓	✓	✓	✓	✓

WELL-2 제품특징



소독 횟수 카운트

사용자가 소독액을 몇 번이나 사용했는지 확인 가능하여 교환주기 판별에 용이



세정제&알코올 기능

소독 전 세정을 통해 소독력 향상
세척·소독 완료 후 알코올로
내시경 채널 내부 건조 및 코팅막 생성



물통 장착으로 세척기능 향상

공급되는 수도의 압력과 관계없이 순환 펌프를 이용해
일정 압력으로 물을 분사하여 세척 진행



넘침방지 시스템

소독제로부터 안전하게 사용 가능한
넘침방지 시스템



넓은 챔버

스콕 2개가 동시에 들어가는 넓은 챔버로
소독시간 단축



WELL-2 사용방법 및 순서



Manual

Scope Setting ▶ Leakage test (Waterproof) ▶

Automatic

Air ▶ Detergent ▶ Air ▶ Disinfecting ▶ Air ▶ Rinse ▶ Washing ▶ Air ▶ Alcohol

※ 세척 및 소독시간은 사용자에 의해 변경 가능

Quick 소독

Air ▶ Disinfecting ▶ Air ▶ Rinse ▶ Washing ▶ Air ▶ Alcohol

WELL-2 제품사양

내시경 누수 테스터	디지털 에어 모드 & 방수 모드
시간설정 (사용자 설정)	1) 세정시간 : 10초~90초 2) 소독시간 : 10초~99분 90초 3) 알코올시간 : 10초(고정)
펌프	누수 체크 펌프, 에어 펌프, 배수 펌프, 소독액 펌프
챔버용량(선택)	약 16L (소독액 탱크 : 18L)
탱크용량	1) 물 : 9L 2) 알코올 : 1L 3) 세정제 : 1L
컨넥터	방수 테스터용 컨넥터 1개 세척용 컨넥터 6개
배출	소독액 잔량 배출호스 1개
전압/주파수	AC 220~240V, 60Hz
소비전력	1500W
크기(WxDxH)	696 x 656 x 1015 mm (커버 닫힘) 696 x 656 x 1445 mm (커버 열림)
중량	81kg